



Produktbeschreibung:

Vulnamin® Gel ist ein Medizinprodukt gemäß der Richtlinie 93/42/EWG, das primär den Wundheilungsprozess unterstützt. Die Hauptbestandteile Hyaluronsäure und verschiedene Aminosäuren begünstigen die Regeneration der Haut durch Förderung der Kollagenbildung und des Aufbaus des Bindegewebes.

Darreichungsform:

Hydrogel

Inhaltsstoffe:

Gereinigtes Wasser, Natriumhyaluronat, Glycin, L-Prolin, L-Leucin, L-Lysin HCl, Methylparahydroxybenzoat, Propylparahydroxybenzoat, Propylenglycol

Indikation:

Vulnamin® Gel ist zur Wundbehandlung, insbesondere zur Behandlung von sehr trockenen und nekrotischen Wunden zur Wiederherstellung eines feuchten Mikroklimas indiziert. Durch die Hyperhydratation des nekrotischen Gewebes wird die Selbstreinigung der Hautläsionen angeregt und die Granulation des darunterliegenden Gewebes gefördert, das zur Heilung beiträgt.

Klinische Wirkungsweise:

Vulnamin® Gel fördert die Abstoßung von nekrotischem Gewebe und schützt die Hautintegrität. Durch die Fähigkeit zur Bildung eines Schutzfilms von Hyaluronsäure kann die Wundheilung der Haut beschleunigt werden. Ferner unterstützen die Aminosäuren L-Prolin, L-Lysin, L-Leucin und Glycin die Kollagensynthese.

Dosierung:

Alle 2–3 Tage sollte der Verbandswechsel entsprechend dem Zustand der Wunde und des Exsudats erfolgen.

Anwendungshinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Nebenwirkungen:

Vulnamin® Gel ist zur äußeren Anwendung geeignet.

Vor der Anwendung die Hände gründlich reinigen. Etwaige Fremdkörper mit aufgespritzter Kochsalzlösung entfernen und die Wunde von innen nach außen reinigen. Nach der Reinigung die Wunde vorsichtig mit sterilen Kompressen tamponieren, um evtl. ausgetretenes Blut zu entfernen. Eine gleichmäßige Schicht auf der gesamten Wundfläche auftragen. Die Wunde mit einem Schutzverband abdecken.

Von der gleichzeitigen Anwendung mit austrocknenden Substanzen wird abgeraten. Trotz der guten Verträglichkeit kann es gelegentlich zu einem brennenden Gefühl kommen, das durch das hypertonische Gel verursacht wird und das für die reinigende Wirkung typisch ist. Das brennende Gefühl reduziert sich für gewöhnlich. Durch das Auftragen des Vulnamin® Gels kann es zur Aufweichung der umliegenden Hautbereiche kommen. Dies ist unbedenklich und bildet sich spontan zurück, wenn der betroffene Bereich einige Minuten an der Luft verbleibt.

Es sind keine Nebenwirkungen und Überdosierungserscheinungen bekannt. Sollten Nebenwirkungen oder lokale Reaktionen und Anzeichen einer Infektion (Schwellung, Erythem, Sekretion, Wärmegefühl oder Schmerzen) auftreten, muss die Behandlung abgebrochen und ein Arzt konsultiert werden. Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf die Anwendung nur auf ärztliche Anweisung erfolgen.

Bei Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe, darf Vulnamin® Gel nicht angewendet werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Wechselwirkungen mit anderen Behandlungen:

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und Medizinprodukten bekannt.

Lagerungshinweise:

Bei 8–30 °C trocken und vor Sonneneinstrahlung / Wärme geschützt lagern. Nicht im Kühlschrank lagern.



Vertreiber:

Burg Pharma GmbH
Wilhelmstraße 8
06406 Bernburg,
Deutschland

Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH

Fachinfo-Service

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt